



QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)

Erforderliches Material

Der QFT®-Plus-Test erfordert ein spezielles Blutabnahmeset, das die folgenden 4 Röhrchen umfasst:

1. Negativkontrolle „NIL“ (grauer Verschluss)
2. Positivkontrolle „Mitogen“ (violetter Verschluss)
3. TB-spezifische Antigene „TB1“ (grüner Verschluss)
4. TB-spezifische Antigene „TB2“ (gelber Verschluss)

Das Abnahmeset können Sie in unserer Versandabteilung online oder per Fax bestellen.

online: www.labor-lademannbogen.de/service/materialanforderung

Fax: (040) 53805 740

Ein entsprechendes Bestellformular finden Sie unter:

www.labor-lademannbogen.de/service/abnahmematerialien

Probennahme und -handhabung

Bitte entnehmen Sie je 1 ml venöses Blut in jedes der 4 Entnahmeröhrchen und beachten folgende Hinweise:

1. Jedes Röhrchen besitzt eine schwarze Markierung, die den validierten Füllbereich anzeigt. Der Füllspiegel des Blutes muss innerhalb dieser Markierung liegen. Bitte belassen Sie die Röhrchen nach dem scheinbaren Erreichen des Füllstandes noch 2-3 Sekunden auf der Nadel, da die Röhrchen das Blut relativ langsam aufnehmen.
2. Mischen Sie die Röhrchen durch 10-maliges Schwenken. Die Antigene befinden sich in getrockneter Form in der Beschichtung der Röhrchen. Vergewissern Sie sich deshalb, dass die gesamte Innenwand der Röhrchen mit Blut benetzt ist.
3. Bei Verwendung von Butterfly-Nadeln zur Blutabnahme ist mit einem Leerröhrchen sicherzustellen, dass die Schlauchverbindung gefüllt ist, bevor die QFT®-Plus-Entnahmeröhrchen aufgesetzt werden.
4. Die Röhrchen müssen spätestens 16 Stunden nach Blutentnahme das Labor erreichen.
5. Die befüllten Röhrchen dürfen nicht gekühlt werden.

Materialanforderung

online: www.labor-lademannbogen.de/service/materialanforderung

Fax: (040) 53805 740 (Formular: www.labor-lademannbogen.de/service/abnahmematerialien)