

Anleitung zur Speichel-Probengewinnung

Drogenanalytik: Speichel-Probenahme mit GREINER SCS[®]-System:



1

Gelbe Extraktionslösung aus dem Röhrchen ① in den Mund überführen und für 2 min spülen.



2

Extraktionslösung in den Becher ② spucken und den Becher zuschrauben.



3

Becher eben abstellen, Aufkleber lösen, Vacutainer-Röhrchen ③ aufstecken, *Deckel eine Vierteldrehung öffnen*. Das Röhrchen füllt sich selbsttätig. Röhrchen abziehen und schwenken zur Konservierung. Möglichst kühl lagern.

Klinische Chemie: Speichel-Probenahme mit Sarstedt Salivette[®]:



1

Blauen Stopfen von der Salivette abnehmen, Stopfen aufheben.



2

Saugrolle in den Mund legen:
a) 1 min mit leichten Kieferbewegungen ohne Kauen
b) für 5 min während eines Patienten-Gesprächs



3

Saugrolle zurück in die Salivette geben lassen, Stopfen aufsetzen. Je nach gewünschter Analyse kühlen oder einfrieren zur Konservierung der Probe. Für Drogen- und Medikamentennachweise wird die Salivette nicht empfohlen.