

## Anleitung zur Speichel-Probengewinnung

Drogenanalytik: Speichel-Probenahme mit GREINER SCS<sup>®</sup>-System:



**1**

Gelbe Extraktionslösung aus dem Röhrchen ① in den Mund überführen und für 2 min spülen.



**2**

Extraktionslösung in den Becher ② spucken und den Becher zuschrauben.



**3**

Becher eben abstellen, Aufkleber lösen, Vacutainer-Röhrchen ③ aufstecken, *Deckel eine Vierteldrehung öffnen*. Das Röhrchen füllt sich selbsttätig. Röhrchen abziehen und schwenken zur Konservierung. Möglichst kühl lagern.

Klinische Chemie: Speichel-Probenahme mit Sarstedt Salivette<sup>®</sup>:



**1**

Blauen Stopfen von der Salivette abnehmen, Stopfen aufheben.



**2**

Saugrolle in den Mund legen:  
a) 1 min mit leichten Kieferbewegungen ohne Kauen  
b) für 5 min während eines Patienten-Gesprächs



**3**

Saugrolle zurück in die Salivette geben lassen, Stopfen aufsetzen. Je nach gewünschter Analyse kühlen oder einfrieren zur Konservierung der Probe. Für Drogen- und Medikamentennachweise wird die Salivette nicht empfohlen.