

## Anleitung zur Speichel-Probengewinnung

Drogenanalytik: Speichel-Probenahme mit GREINER SCS<sup>®</sup>-System:



**1**

Gelbe Extraktionslösung aus dem Röhrchen ① in den Mund überführen

und für 2 min spülen.



**2**

Extraktionslösung in den Becher ② spucken und

den Becher zuschrauben.



**3**

Becher eben abstellen, Aufkleber lösen, Vacutainer-Röhrchen ③ aufstecken,

Deckel eine Vierteldrehung öffnen. Das Röhrchen füllt sich selbsttätig.

Röhrchen abziehen und schwenken zur Konservierung. Möglichst kühl lagern.