



BAG-Sporenstreifen - Bio-Indikatoren zur Überprüfung von Sterilisationszyklen

Kontrolluntersuchung der Sterilisationsfunktion

Zur Überprüfung der Sterilisationsfunktion erbitten wir die Untersuchung (Anzucht und Auswertung) der beigefügten BAG-Sporenstreifen.

Ein zusätzlicher nicht sterilisierter Sporenstreifen, als Positivkontrolle, ist markiert.

Durchgeführte Sterilisation (bitte eine Option ankreuzen):

- Heißluft-Sterilisation
 Dampf-Sterilisation

Weitere Angaben (ggf. ergänzen):

Arztstempel / Einsender

Sterilisation - Kurzanleitung

1. 4 BAG-Bio-Strips dem zu sterilisierenden Material beifügen.
Sporenstreifen müssen in der Umhüllung bleiben. Diese darf auch nicht aufgerissen werden.
2. Verschiedene Positionen in der Sterilisationskammer wählen, die ungünstige Bedingungen erwarten lassen. Sterilisationszyklus wie gewohnt durchführen.
3. Sterilisierte Sporenstreifen plus 1 nicht sterilisierter Sporenstreifen (als Positivkontrolle markiert) nach Beendigung des Zyklus an das Labor zur Anzucht weiterleiten.
Bitte unbedingt vermerken, ob Heißluft- oder Dampf-Sterilisation durchgeführt wurde!

Materialanforderung

Tel.: 040 / 53805 139

Fax: 040 / 53805 740

<http://www.labor-lademannbogen.de/service/abnahmematerialien/>